
LIFTOSIUM

Table de massage

REF/ LWM15M

KOMODO



NOTICE


Description

- Table de massage en bois dur et mousse orthopédique, élégante et confortable, avec dossier relevable
- Mécanisme manuel d'ajustement du dossier

Caractéristiques techniques

- **Equipement :**

- Table de massage 2 plans
- Avec ou sans trous visage
- Dossier inclinable à 30°, 45°, 60°
- Mécanisme d'ajustement du dossier en hêtre

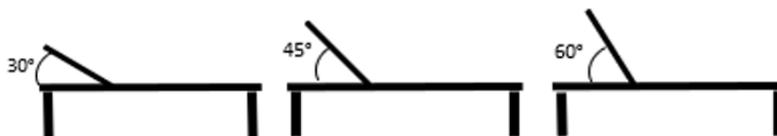

- **Matériaux :**

Sellerie :

- skaï Italien
- Mousse orthopédique D30

Châssis :

- bois rouge
- bois de hêtre


- **Couleurs :**

- Marron cedar
- Bleu prusse
- Gris shadow

- Poids de la table : 28 kg
- Capacité de charge : 170 kg
- Origine : fabriquée en Algérie
- Garantie : 1 an

- **Dimensions :**

- Table : 198x70 cm
- Relève-buste : 74x70 cm
- Hauteur 60 cm
- Epaisseur sellerie : 5 cm

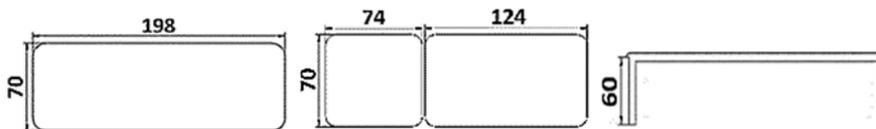

Entretien

- **Sellerie :**
 - Enlevez la poussière avec un chiffon humide.
 - Il est recommandé de nettoyer les tables avec : savon, l'eau ou des produits a ph neutre
 - Les produits abrasifs et alcoolisés sont déconseillés. Ils peuvent détériorer votre table
 - Nettoyez les taches le plus rapidement possible avant qu'elles ne s'incrustent
 - Eviter les solvants, détergents et détachants en général car ils contiennent des substances nocives.
 - N'exposez pas trop longtemps la table aux infrarouges. Les infrarouges peuvent à terme dégrader le tissu de votre table de massage.
- **A quelle fréquence devez-vous nettoyer votre table de massage**

Un grand nettoyage de votre table de massage est à effectuer au minimum une fois par semaine afin de respecter les procédures réglementaires d'hygiène au sein d'un cabinet.

Pour les masseurs, vous devez nettoyer votre table entre chaque massage pour conserver une bonne hygiène. En effet, l'huile de massage est très grasse, il faut donc passer un chiffon humide pour éviter que l'huile qui aurait filtré ne s'incruste dans la sellerie de votre table. Les crèmes et huiles de massages peuvent dénaturer le skaï et affecter sa durabilité.

Quel kit doit-on posséder pour entretenir la table de massage

- Rouleau de papier jetable
- Housse de protection
- Des lingettes désinfectantes

Nous vous remercions d'avoir choisi la table de massage KOMODO. La table de massage est conforme aux exigences et normes de sécurité.

Si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant à l'amélioration à apporter à nos équipements, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus.

Pour tout autre renseignement sur Liftosium, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

info@liftosium.com

L'entreprise Liftosium décline toute responsabilité en cas d'erreur de manipulation de notre équipement.

La version actuelle de cette notice est disponible dans plusieurs langues dans notre boutique en ligne, dont le lien d'accès est :
[https:// www.liftosium.com](https://www.liftosium.com)

Notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

02 rte des Vieillards, Bouzareah 16340, Alger

Pour le retour de votre marchandise en vue de réparation, veuillez utiliser l'adresse précédente.

Important ! Ne jamais renvoyer la marchandise sans l'accord préalable de notre service après-vente. L'envoi sera refusé à la réception.

A votre écoute :

Mob : + 213 660 20 84 38/ 20 93 32 (de 7h 30 à 20h 00 du Samedi au Jeudi)

Tél : +213 23 18 27 70 (de 7h 30 à 16h30 du dimanche à jeudi)