
LIFTOSIUM

Table de consultation

REF/ LWE25M

MYSTIC



NOTICE


Description

- Table de consultation en bois dur et mousse orthopédique, robuste et fonctionnel, avec dossier relevable
- Mécanisme manuel d'ajustement du dossier

Caractéristiques techniques

- **Equipement :**

- Table de consultation 2 plans
- Avec ou sans trous visage
- Dossier inclinable à 30°, 45°, 60°
- Mécanisme d'ajustement du dossier en hêtre

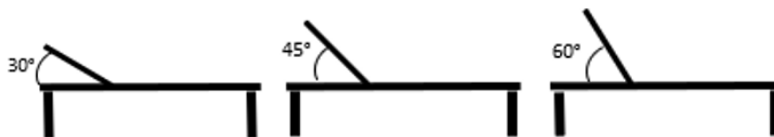

- **Matériaux :**

Sellerie :

- skaï Italien
- Mousse orthopédique D30

Châssis :

- bois rouge
- bois de hêtre


- **Couleurs :**

- Marron cedar
- Bleu prusse
- Gris shadow

- Poids de la table : 38 kg
- Capacité de charge : 170 kg
- Origine : fabriquée en Algérie
- Garantie : 1 an

- **Dimensions :**

- Table : 198x70 cm
- Relève-buste : 74x70 cm
- Hauteur 80 cm
- Epaisseur sellerie : 5 cm

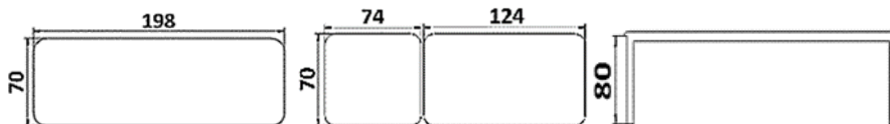

Entretien

- **Sellerie :**
 - Enlevez la poussière avec un chiffon humide.
 - Il est recommandé de nettoyer les tables avec du savon, de l'eau ou des produits à pH neutre
 - Les produits abrasifs et alcoolisés sont déconseillés ; ils peuvent détériorer votre table
 - Nettoyez les taches le plus rapidement possible avant qu'elles ne s'incrustent
 - Eviter les solvants, détergents et détachants en général car ils contiennent des substances nocives.
- **A quelle fréquence devez-vous nettoyer votre table de consultation**

Un médecin doit veiller à la stérilisation et à la décontamination des tables qu'il utilise, selon les procédures réglementaires. La désinfection dans un milieu médical doit être réalisée avec précaution pour éviter les infections.

Un grand nettoyage de votre table est à effectuer au minimum une fois par semaine afin de respecter les procédures réglementaires d'hygiène au sein d'un cabinet.

Quel kit doit-on posséder pour entretenir la table de consultation

- Rouleau de papier jetable
- Housse de protection
- Des lingettes désinfectantes

Nous vous remercions d'avoir choisi la table de consultation MYSTIC. La table de consultation est conforme aux exigences et normes de sécurité.

Si vous désiriez nous communiquer des suggestions quant à l'amélioration à apporter à nos équipements, n'hésitez pas à nous contacter. Vos messages seront les bienvenus.

Pour tout autre renseignement sur Liftosium, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante :

info@liftosium.com

L'entreprise Liftosium décline toute responsabilité en cas d'erreur de manipulation de notre équipement.

La version actuelle de cette notice est disponible en plusieurs langues dans notre boutique en ligne, dont le lien d'accès est :

www.liftosium.com

Notre service après-vente se tient à votre disposition à l'adresse suivante :

02 rte des Vieillards, Bouzareah 16340, Alger

Pour le retour de votre marchandise en vue de réparation, veuillez utiliser l'adresse précédente.

Important ! Ne jamais renvoyer la marchandise sans l'accord préalable de notre service après-vente. L'envoi sera refusé à la réception.

A votre écoute :

Mob : + 213 660 20 84 38/ 20 93 32 (de 7h 30 à 20h 00 du Samedi au Jeudi)

Tél : +213 23 18 27 70 (de 7h 30 à 16h30 du dimanche à jeudi)